

Tuigje voor Navelbreuk bij Alpaca Cria

Zeer goed verstelbaar met klittenband gordels.

Dit tuigje helpt om een navelbreuk te sluiten. Doordat de zachte foampad de navelbreuk naar binnen drukt, helpt dit het veulen zonder veterinaire interventies de navelbreuk te sluiten.

Gebruiksaanwijzing:

- 1) Plaats het kussentje (Pad) op de navelbreuk
- 2) Sluit gordel 1, relatief strak, vlak voor het heupgewricht
- 3) Sluit gordel 4, relatief strak, rond de borst
- 4) Sluit gordels 2 & 3
- 5) Pas alle klittenband gordels aan voor een perfecte pasvorm

Waarschuwingen voor gebruik:

Het is aanbevolen om de navel met jodium of ontsmettingspray te ontsmetten voordat u het tuigje omdoet.

Doe zo jong mogelijk het tuigje om, maar niet binnen 48 uur na de geboorte.

De navelstreng moet gesloten en droog zijn voordat het tuigje om kan.

Doe de gordels niet te strak! Er moet altijd tussen elke gordel en de huid makkelijk een vinger passen.

Check het tuigje elke dag of het nog comfortabel zit & het kussentje op de juiste positie zit.

Om de positie en voortgang van navelbreuksluiting te monitoren, kunt u eenvoudig gordel 1 losmaken en de stof naar voren klappen.

Het tuigje moet minimaal 2 weken om. Als de navelbreuk dan nog niet substantieel verbeterd is, dient u veterinair advies in te winnen.

Na gebruik dient u het tuigje altijd uit te wassen en te ontsmetten.

Gebruik van dit product is volledig voor eigen risico.

